

# Otras ayudas...

# ¿Más preguntas?

Disponemos también de una serie de ayudas adicionales para el sistema RodGer.

Protector cubre colchones

Cojín vibrador

Cojín vibrador para conectar al sistema de alarma.

¿Quiere conocer más al respecto?  
[www.ccten.es](http://www.ccten.es)


El sistema RodGer es distribuido por:




distribuidor Rodger

CCTEN Ltda. Santiago de Chile

Fono (0056) 2 6628433  
Mail [info@ccten.com](mailto:info@ccten.com)  
Web [www.ccten.com](http://www.ccten.com)

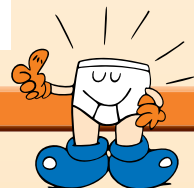

rodger

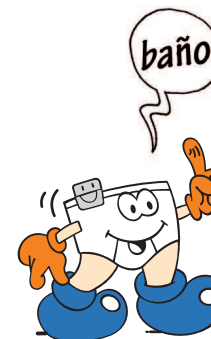

rodger  
[www.ccten.com](http://www.ccten.com)

¡Enuresis!

¡Tiene solución!

# ¿Como dejará mi hija/o de mojar la cama?



Si su hijo moja la cama frecuentemente, sabrá lo problemática que es. Es más que una simple cama mojada: supone tensión y stress en la familia, miedo a acostarse, para su hija/o inseguridad ante sus amigos y gran cantidad de trabajo adicional de limpieza.

Esta es la pregunta que muchos padres se plantean. La respuesta ha sido difícil. No solo para Ud., si no también para los laboratorios y doctores, que durante mucho tiempo han buscado la respuesta. Afortunadamente, creemos haber encontrado la solución: el sistema de alarma RodGer.

## Igual de fácil.

El sistema de alarma de enuresis es tan fácil de usar como su ropa interior.

La prenda aparentemente igual a la convencional es válida como braguita o slip, dispone de imper-



ceptibles sensores de humedad y una conexión a dos botones de presión que conectarán al emisor de radio frecuencia. Después, su hija/o podrá ir a la cama tranquilamente. El transmisor es de un tamaño tan reducido que no le molestará durante el sueño. Esto lo hace sumamente sencillo y cómodo, permitiendo la completa libertad de movimientos durante toda la noche. Finalmente, el receptor, que incorpora la alarma, será enchufado a una toma de corriente en el mismo cuarto. Con la pérdida de unas pocas gotas de orina, la alarma se activará avisando a su hija/o. De esta manera, en unas pocas semanas, aprenderá a reconocer la sensación de tener la vejiga llena y a anticiparse a la alarma acudiendo al cuarto de baño. Además, el sistema se suministra con un diario miccional en el que su hija/o podrá anotar sus progresos pegando divertidas pegatinas. Este diario reforzará su interés en colaborar de manera amena y espontánea.

## ¿Dejará mi hija/o de mojar la cama?

¿Se pregunta si el sistema puede solucionar el problema de enuresis nocturna? Frecuentemente, a los pocos días un progreso ya será visible y el problema quedará resuelto en cuestión de semanas. La combinación de perseverancia y motivación son la clave, tanto para los padres como para los hijos. Utilizando el sistema de alarma de enuresis por radiofrecuencia, Ud. tendrá la



tranquilidad de sentir que su hija/o se despierta en una cama seca. Eso significa mucho: poder acostarse tranquilo, saber que su hija/o esta descansada/o a la mañana siguiente o con sus amigos y ..... menos trabajo de limpieza.

## Testado y seguro

Tanto el mundo académico como la práctica clínica han testado el sistema de alarma de enuresis por radiofrecuencia intensivamente. El sistema también es utilizado en el ámbito hospitalario. El sistema RodGer de alarma de enuresis por radiofrecuencia se ajusta a todos los estándares y normativas de seguridad y funcionalidad (CE).

